

HOW TO PERFORM AED

자동심장충격기 행동요령

1 자동심장충격기 켜기



- 자동심장충격기를 켭니다.
- 자동심장충격기는 반응과 정상적인 호흡이 없는 **심정지 환자**에게만 사용합니다.



자동심장충격기
(자동제세동기, AED)

환자의 피부에 부착된 전극을 통하여 전기충격을 심장에 보내 심방이나 심실의 세동 (비정상적으로 빠르게 떨려 제대로 된 심장기능을 하지 못하는 상태) 을 제거하는 제세동기를 자동화하여 만든 의료기기

2 두 개의 패드 부착



- 환자의 상의를 벗긴 후에, 두 개의 패드 중 한 패드를 **오른쪽 쇄골 아래**에 부착하고, 다른 패드는 **왼쪽 젖꼭지 아래의 겨드랑이 중앙선**에 부착합니다.

3 심장리듬 분석




- 자동심장충격기가 심정지 환자의 심전도를 자동으로 분석하는 동안에는 **환자와 접촉하지 않습니다.**

4 심장충격 실시



- 심장충격이 필요하면 "심장충격이 필요합니다." 라는 음성지시와 함께 심장충격기가 스스로 충전합니다.
- 충전 완료 후 "**심장충격 버튼을 누르세요.**"라는 음성 지시가 나오면 모든 사람이 환자와 접촉하지 않도록 한 후에 **심장충격 버튼을 누릅니다.**

5 즉시 심폐소생술 다시 시행

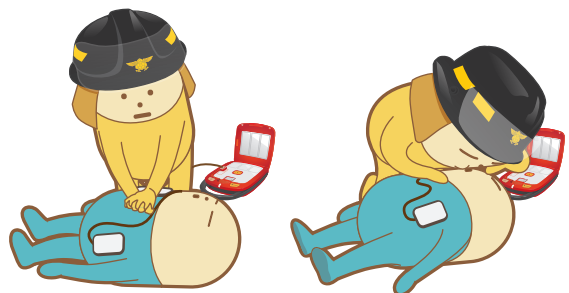

- 심장충격을 시행한 후에는 **즉시 심폐소생술을 시행합니다.**
- 또한, "**환자의 상태를 확인하고, 심폐소생술을 계속 하십시오**" 라는 지시가 나오면 바로 심폐소생술을 시행합니다.